

ACHTEN SIE AUF IHRE MITMENSCHEN MUNSKYDD MATERIALIEN



MATERIALIEN

- Stoffreste
- Gummiband, ca. 5 mm

ACHTUNG:

Das Tragen eines Mundschutzes kann das Risiko einer Übertragung von Viren auf andere mindern, wissenschaftlich belegt ist diese Schutzwirkung aber lt. Robert Koch Institut (RKI) nicht.

Textilien werden nicht bei Herstellung von professionellen Mundschutzmasken verwendet.

Bitte informieren Sie sich fortlaufend und folgen Sie den Empfehlungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zum Schutz vor einer Corona Infektion: <https://www.bzga.de>

Wenn Sie den Mundschutz mehrfach verwenden möchten, achten Sie darauf eine Meterware zu wählen, die bei hohen Temperaturen gewaschen werden kann.

Unter folgendem Link können Sie Hinweise für den Umgang mit Textilien und Bekleidung finden:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ambulant.html

Mundschutz mit Falten:

- Schneiden Sie die 2 Stoffteile entsprechend der Schablone zu.
- Schneiden Sie 2 x 18/20 cm Stücke des Gummibandes zu.
- Legen Sie an beiden Seiten den Stoff gemäß dem Schnittmuster in Falten und nähen Sie an beiden Teilen die Falten an den Seiten im Abstand von 1,5 cm zur Kante fest. Falten bügeln.
- Nähen Sie die beiden Gummibänder mit 0,5 cm Abstand zur oberen und unteren Kante an ein Schnittteil fest (siehe Zeichnung).
- Bügeln Sie die schmale Seite 1,5 cm nach links um (Gummiband liegt außen).
- Nähen Sie die 2 Maskenteile rechts auf rechts an der langen Kante mit 0,5 cm Nahtzugabe zusammen.
- Maske wenden (Nahtzugabe liegt innen).
- Steppen Sie die Seiten (Gummiband liegt außen) knappkantig zu.



Mundschutz mit Naht:

- Schneiden Sie 2 Stoffteile nach Schablone zu.
- Schneiden Sie 2 x 16/18 cm Stücke des Gummibandes zu.
- Falten sie die Schnittteile rechts auf rechts und nähen sie die Abnäher (siehe Zeichnung).
- Nähen Sie die beiden Gummibänder mit 0,5 cm Abstand zur oberen und unteren Kante an ein Schnittteil fest (siehe Zeichnung).
- Bügeln Sie die schmale Seite 1,5 cm nach links um (Gummiband liegt außen).
- Nähen Sie die 2 Maskenteile rechts auf rechts an den langen Seiten mit 0,5 cm Nahtzugabe zusammen. Maske wenden (Nahtzugabe liegt innen)
- Steppen Sie die Seiten (Gummiband liegt außen) knappkantig zu.



